



部番	部品名	個数	材質	摘要
1	灯体	1	A1P(アルミニウム)t1.2	メラミン焼付塗装(マイルドホワイト)
2	スイッチ	1	-	-
3	ランプ	1	-	LEDユニットフラット形(別売)
4	前面カバー	1	-	アクリル(透明)
5	アーム	1	-	メラミン焼付塗装(マイルドホワイト)
6	ストッパ	1	POM(ポリオレフィン)	白
7	プラグ付き電源コード	1	VFF(ビニルコード)	耐熱(白) 器具外長さ約200mm
8	化粧ねじ	1	C3604	クロームメッキ仕上げ

**安全に関するご注意**

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は、屋内専用です。屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直接日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・この器具は、メディカルコンソール取付け専用です。指定以外の方向で取り付けますと、器具落下の原因となります。
- ・アームの抜け防止ねじは、確実に取り付けてください。器具落下の原因となります。取り付けには専用の取付け金具【IMY-91002(別売)】をご使用ください。
- ・カーテンなどの燃えやすいものの近くに取付けないでください。火災の原因となります。

《下記の注意事項を守ることが困難な方が使用される恐れのある場所では、使用しないでください。器具落下・感電・破損の原因となります。》

- ・濡れた手で触ったり、水分をかけたらないでください。感電の原因となります。
- ・アームを無理に動かさないでください。器具破損・落下の原因となります。
- ・安全上、LED光源を直視することはお止めください。
- ・毛布や枕などの布類や紙などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災の原因となります。
- ・灯具部に長時間触れないでください。低温やけどの原因となります。

適合メディカルコンソール
IMY-20800
IMY-21200
IMY-21400

適合ランプ
LDF4L-HGX/C7/5/2
LDF4WW-HGX/C7/5/2
LDF4W-HGX/C7/5/2
LDF4N-HGX/C7/5/2

**(ご注意)**

- 1) LEDにはバツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 2) 照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが気になる場合がありますのでご了承ください。
- 3) 位置表示スイッチ(オフピカスイッチ、オンオフピカスイッチ、ホタルスイッチなど)と組み合わせては使用しないでください。使用した場合、照明器具がわずかに発光したり、点滅したりする可能性があります。
- 4) 器具と被照射物との距離は0.1m以上離してください。距離を保たないと被照射物の変色、変形の原因となります。
- 5) メディカルコンソールへ取り付けの際は、専用の取付け金具【IMY-91002(別売)】をご使用ください。

メディカルコンソール取付け用 屋内用

電圧(V)	適合ランプ	質量(kg)	形名
100	適合ランプ一覧参照(別売)	1.2	LEDA-04003
			東芝LEDベッド灯
承認	担当	図番	AA2012-00539-07
松田	竹中	東芝ライテック株式会社	
単位 mm	第三角法		