

形名	LEDA-04001 (メディカルコンソール用)	LEDA-04002 (壁直付用)
適合ランプ (別売)	E-CORE(LED電球)	LDA7L/WD


このたびは、東芝LEDベッド灯をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

工事店様へ 施工上のご注意

●工事が終了しましたら、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

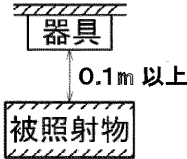⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	
● 器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災等の原因となります。 ● この器具は屋内用です。屋外、軒下および湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、振動の激しい場所では使用しないでください。絶縁不良、感電等の原因となります。	● 器具を改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめください。器具落下、感電、火災の原因となります。 ● この器具は照明システム (MES L など) との組み合わせはできません。破損、発煙、短寿命、ちらつきの原因となります。	● 器具と被照射物との距離は0.1m以上離して使用してください。指定よりも近すぎると、被照射物の変色、変形、火災の原因となります。 

⚠

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この器具は屋内専用で、5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所で使用しますと火災の原因となります。
- 器具を密閉した空間に設置しないでください。ランプ短寿命の原因となります。
- 器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用しますとランプ、器具などの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧と電源電圧は取り付けの前に必ず確認してください。)


お客様へ 使用上のご注意

●お客様は、お読みになったあとも必ず保管してください。


	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
● ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。電源を入れたまま交換を行うと感電の原因となります。 ● ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因になります。 ● 器具の隙間や放熱穴に金属物などを差し込まないでください。感電や火災の原因となります。 ● ランプ交換の際は、必ず本体表示ならびに取扱説明書どおりの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外をご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。 ● 点灯中および消灯直後(約20分)は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。		

</

■各部の名前

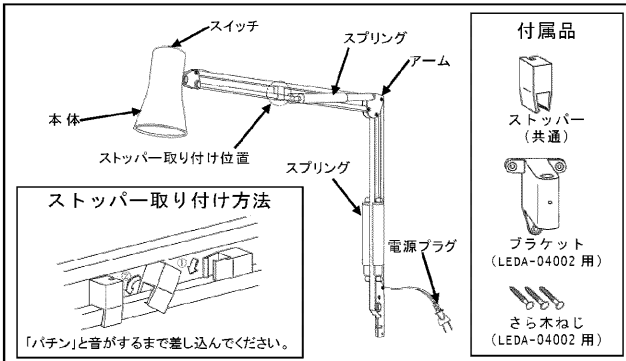

LED A-04001

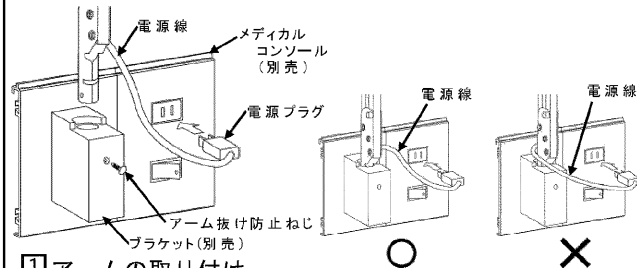

1 アームの取り付け

アーム抜け防止ねじを緩め、アームをブラケットに差し込んだ後、アーム抜け防止ねじを確実に取り付けてください。

不備がありますと、アーム落下の原因となります。

2 電源プラグの接続

電源線がアームの背面側を通るようにして、電源プラグを医療コンソールのコンセントに確実に差し込み、点灯確認を行ってください。不備がありますと、感電・火災の原因となります。

3 ランプの取り付けかた

ランプをランプソケットの奥まで確実にねじ込んでください。

不備がありますと、感電・火災の原因となります。

4 ストッパーの取り付けかた（左上図参照）


上記の「各部の名前」に示す位置にストッパーを確実に取り付けてください。ストッパーを取り付けない場合、けがの原因となります。

■アームの調整について

アームの操作力の調整は、ツマミを適度に締付け調整してください。

■器具の取り付けかた

LED A-04002

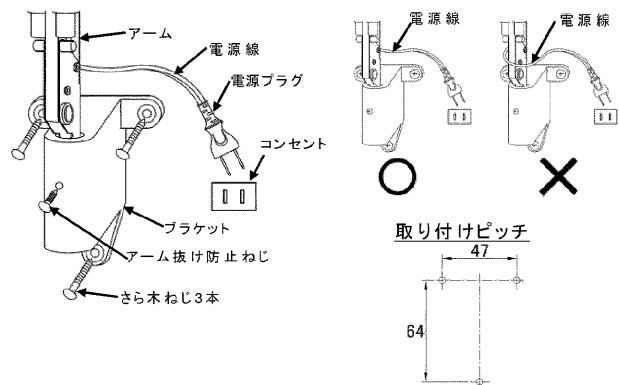

1 ブラケットの取り付け

付属のブラケットをねじ3本で壁に取り付けてください。

ねじは器具取り付け壁にあったものを使用し、まっすぐ締め付けてください。不備がありますと器具落下の原因となります。

ブラケットは、器具重量に耐える丈夫で平らな壁面に取り付けてください。壁面が弱い場合は、補強を十分に行ってください。不備がありますと、器具落下の原因となります。

2 アームの取り付け

アーム抜け防止ねじを緩め、アームをブラケットに差し込んだ後、アーム抜け防止ねじを確実に取り付けてください。

不備がありますと、アーム落下の原因となります。

3 電源プラグの取り付け

電源線がアームの背面側を通るようにして、電源プラグを医療コンソールのコンセントに確実に差し込み点灯確認を行ってください。不備がありますと、感電・火災の原因となります。


4 ランプの取り付けかた

ランプをランプソケットの奥まで確実にねじ込んでください。

不備がありますと、感電・火災の原因となります。

5 ストッパーの取り付けかた

上記の「各部の名前」に示す位置にストッパーを確実に取り付けてください。ストッパーを取り付けない場合、けがの原因となります。

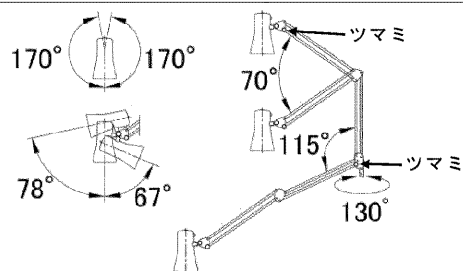

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048（通話料：無料）

受付時間：365日 9:00~20:00

携帯電話：PHSなど 046-862-2772（通話料：有料）

FAX 0570-000-661（通話料：有料）

お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- (2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷

2. 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

日本国内専用

Use only in Japan

東芝ライテック株式会社

器具事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL (046) 862-2092

FAX (046) 861-8796

お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

35200158